

Pantone 5415

Hergestellt von:



optimummedical®

Vertrieb in Deutschland:



AUROSAN

 Optimum Medical Solutions Ltd
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds,
LS2 9ET, United Kingdom,
Tel.: +44 (0) 8456 435 479
enquiries@optimummedical.co.uk
www.optimummedical.co.uk



REF 3000

Ugo Katheterventil

ANWENDUNG

Ein dezentes, komfortables, leicht zu bedienendes Katheterventil mit Sicherheitshebel-Funktion, um versehentliches Öffnen zu verhindern.

EINFÜHRUNG

Wir bei **Optimum Medical** wissen, wie wichtig Ihre Unabhängigkeit ist. Das **Ugo** Katheterventil wurde speziell konzipiert, damit Sie sich jeden Tag wohl und sicher fühlen. Das **Ugo** Katheterventil wurde Ihnen von Ihrem Arzt nach einer Blasen- und Katheterbeurteilung verschrieben. Es ist wichtig, dass Sie das Ventil wie von Ihrem Arzt oder einer Krankenschwester angeordnet als Teil Ihres laufenden Katheter Managements verwenden. Verwenden Sie das **Ugo** Katheterventil nur, wenn Sie (oder Ihr Betreuer) es in regelmäßigen Abständen bedienen können und Sie sich daran erinnern, dies getan zu haben.

GEGENANZEIGEN

Das **Ugo** Katheterventil ist nicht geeignet für Personen;

- die das Ventil nicht bedienen können
- die sich nicht merken können, wie man das Ventil bedient
- die eine geringe Blasenkapazität haben
- die eine verringerte Empfindung der Blase haben
- die eine geschädigte Niere haben oder unter urethralem Reflux leiden
- die eine unkontrolliert überaktive Blase haben

WIE SIE IHRE BLASE MIT DEM UGO VENTIL ENTLEREEN

1. Entleeren Sie Ihre Blase mit dem Ventil so oft, wie von Ihrem Arzt oder einer Krankenschwester empfohlen
2. Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie diese
3. Halten Sie das Ventil über eine Toilette oder ein geeignetes Gefäß
3. Öffnen Sie das Ventil, indem Sie den Hebel vollständig in die untere Position stellen
(Sie können eine leichte Spannung am Hebel fühlen, das ist normal - es ist die Sicherheits-Funktion, die ein versehentliches Öffnen verhindert)
4. Entleeren Sie die Blase mit dem Ventil vollständig (der Fluss kann langsam sein - dies liegt am engen Lumen im Inneren des Katheters)
5. Sobald der Urin entleert ist, stellen Sie das Ventil durch Anheben des Hebels vollständig in die aufrechte Position
6. Trocknen Sie das Ende des Ventils, wenn nötig mit einem sauberen Tuch
7. Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie diese
 - Entleeren Sie Ihre Blase mit dem Ventil so oft, wie von Ihrem Arzt oder einer Krankenschwester empfohlen
 - Wechseln Sie Ihr Ventil alle 7 Tage oder früher, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist
 - Ein Nacht-Drainagebeutel kann mit dem weichen Silikon -Schlauch verbunden werden
 - Wenn die Ventilverpackung defekt ist, verwenden Sie das Ventil nicht, weil es eventuell nicht mehr steril ist

STERILE/O



0473

