

Pantone 5415

Hergestellt von:



optimummedical®

Vertrieb in Deutschland:



**AUROSAN**

Optimum Medical Solutions Ltd  
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds,  
LS2 9ET, United Kingdom,  
Tel.: +44 (0) 8456 435 479  
enquiries@optimummedical.co.uk  
www.optimummedical.co.uk



**Ugo fix™**  
bag belt

REF 3012

## Ugo Fix Beinbeutel Kletthalteband

Bei **Optimum Medical** verstehen wir die Notwendigkeit einer sicheren und zuverlässigen Fixierung und Unterstützung Ihres Katheters und Ihres Beinbeutels. Das **Ugo Fix** Beinbeutel Kletthalteband bietet verbesserten Halt und Komfort für Ihre **Ugo** Beinbeutel. So fühlen Sie sich sicher, wenn Sie Ihre Aktivität steigern. Es eignet sich dafür den **Ugo** Beinbeutel jeder Größe an Ihrem Oberschenkel, oberen Knie oder Schienbein zu befestigen.

Das **Ugo Fix** Beinbeutel Kletthalteband ist so konzipiert, dass er die Oberseite Ihres **Ugo** Beinbeutels hält.

Es ist regulierbar und kann bei Bedarf auf ein Stück geschnitten werden. Das **Ugo Fix** Beinbeutel Kletthalteband ist waschbar und wiederverwendbar, bitte beachten Sie die Waschanleitung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG


Es ist wichtig, dass Sie den Katheter oder den Beinbeutel nicht frei hängen lassen, da dies zu Beschwerden führen kann. Stützen Sie das Gewicht Ihres Beinbeutels immer ab, wenn Sie das **Ugo Fix** Beinbeutel Kletthalteband befestigen.

### ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Sie können Ihren **Ugo** Beinbeutel zuerst am **Ugo Fix** Beinbeutel Kletthalteband und dann an Ihrem Bein befestigen (Methode A) oder Sie empfinden es einfacher den **Ugo Fix** Beinbeutel Kletthalteband leicht am Bein zu fixieren und dann an Ihrem **Ugo** Beinbeutel zu befestigen (Methode B).


#### METHODE A

- 1 • Führen Sie die blauen Klettverschlusslaschen durch die vier Löcher an der Oberseite Ihres Ugo Beinbeutels und sichern Sie sie
  - 2 • Legen Sie das Ugo Fix Beinbeutel Kletthalteband um das Bein in der gewünschten Position, wobei die Silikonlinie nach unten auf die Haut zeigt und an der richtigen Stelle sitzt
- Stellen Sie sicher, dass das Ugo Fix Beinbeutel Kletthalteband nicht zu eng sitzt, Ihr Katheter nicht zieht und Sie sich bequem mit ihm bewegen können.

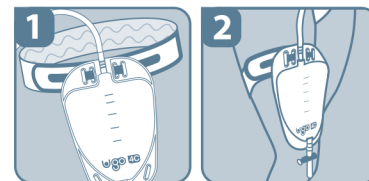

#### METHODE B

- 1 • Legen Sie das Ugo Fix Beinbeutel Kletthalteband um das Bein in der gewünschten Position, wobei die Silikonlinie nach unten auf die Haut zeigt und an der richtigen Stelle sitzt
  - 2 • Führen Sie die blauen Klettverschlusslaschen durch die vier Löcher an der Oberseite Ihres Ugo Beinbeutels und sichern Sie sie
- Stellen Sie sicher, dass das Ugo Fix Beinbeutel Kletthalteband nicht zu eng sitzt, Ihr Katheter nicht zieht und Sie sich bequem mit ihm bewegen können

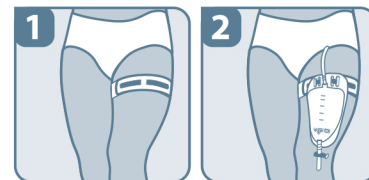

**WARNHINWEIS: Von Kindern fernhalten!**

