



LEG BAGS and 2 LITRE DRAINAGE BAGS



LATEX FREE



Ugo-leg bag-FU-July15-V1.0



optimummedical®

Optimum Medical Solutions Ltd
47 Park Square East, Leeds, LS1 2NL, UK
Tel.: +44 (0) 8456 435 479
enquiries@optimummedical.co.uk
www.optimummedical.co.uk

DEU

UGO BEINEUTEL UND 2-LITER-DRAINAGEBEUTEL

VERWENDUNGSHINWEISE

Ugo Beinbeutel und Ugo 2-Liter-Drainagebeutel sind für die Sammlung, Aufbewahrung und Drainage von Urin.

BEINBEUTEL

Der Ugo Beinbeutel kann bis zu 7 Tage an Ihrem Katheter befestigt sein.

Alle Beinbeutel sind steril verpackte Beutel und haben ein nadellooses Entnahmeventil.

Werden in 10-er Boxen geliefert.

Bringen Sie einen benutzten Beinbeutel nie noch einmal an.

GEMEINWESEN BEINBEUTEL – Gewebeunterstützung

- 1 Paar Ugo Fix Beinriemen in jeder Box

REF.	Produktbeschreibung:			
1C/500/ST/L	Ugo 1C	500ml	kurzer Schlauch	Hebelhahn
2C/500/LT/L	Ugo 2C	500ml	langer Schlauch	Hebelhahn
3C/500/ST/T	Ugo 3C	500ml	kurzer Schlauch	T-Hahn
4C/500/LT/T	Ugo 4C	500ml	langer Schlauch	T-Hahn
5C/350/DI/L	Ugo 5C	350ml	direkter Abfluss	Hebelhahn
6C/350/ST/L	Ugo 6C	350ml	kurzer Schlauch	Hebelhahn
7C/750/ST/L	Ugo 7C	750ml	kurzer Schlauch	Hebelhahn
8C/750/LT/L	Ugo 8C	750ml	langer Schlauch	Hebelhahn

KRANKENHAUD-BEINBEUTEL – keine Gewebeunterstützung

- 1 Paar Ugo Fix Beinriemen in jeder Tasche

REF.	Produktbeschreibung:			
1H/500/ST/L	Ugo 1H	500ml	kurzer Schlauch	Hebelhahn
2H/500/LT/L	Ugo 2H	500ml	langer Schlauch	Hebelhahn
3H/500/ST/T	Ugo 3H	500ml	kurzer Schlauch	T-Hahn
4H/500/LT/T	Ugo 4H	500ml	langer Schlauch	T-Hahn

SO BEFESTIGEN SIE IHREN UGO BEINBEUTEL AN IHREM KATHETER

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger den Beinbeutel für Sie wechselt, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Entfernen Sie Riemen oder Hülle, die Ihren Ugo Beinbeutel an Ihrem Bein halten.
- Öffnen Sie die Taschenverpackung für einen neuen Ugo Beinbeutel und entfernen Sie die Schutzkappe vom abgestuften Anschluss des Beinbeutels.
- Nehmen Sie den alten Beinbeutel vom Katheter, befestigen Sie sofort den abgestuften Anschluss an dem neuen Beinbeutel und stellen Sie eine ausreichende Abdichtung sicher (der Beinbeutel wird in Schließstellung geliefert).

- Es ist wichtig, dass Sie die Enden des Katheters oder des Beinbeutelanschlusses während des Wechsels nicht berühren (Technik ohne Berühren).
- Die entfernte Schutzkappe des neuen **Ugo** Beinbeutels kann an den abgestuften Anschluss des alten Beinbeutels angefügt werden.
- Verwenden Sie Ihre Beinbeutel-Befestigung und die Stützgeräte und passen Sie sie an, um optimale Drainage und Bequemlichkeit zu gewährleisten. Wenn die den gelieferten Beinbeutelriemen verwenden, führen Sie die Beinriemen durch die Ösen auf dem Beutel und stellen Sie sicher, dass der Silikongriff zum Bein zeigt. Alternativ können Sie die **Ugo Fix**-Hülle für zusätzliche Stütze verwenden. Wenn Sie mehr erfahren möchten, kontaktieren Sie ugo@optimummedical.co.uk.
- Entleeren Sie den Urin aus Ihrem alten Beinbeutel in die Toilette und entfernen Sie den Beutel, wie von Ihrer Krankenschwester empfohlen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.

SO ENTLEREN DIE IHREN UGO BEINBEUTEL

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger den Beinbeutel für Sie entleert, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Halten Sie den Ablaufhahn über eine Toilette oder einen passenden Behälter.
- Öffnen Sie den Hahn durch Schieben des T-Hahns oder Drücken des Hebelhahns nach unten.
- Lassen Sie den Beutel vollständig abtropfen und schließen Sie dann den Hahn.
- Trocknen Sie das Ende des weichen Silikonabfluss-Schlauchs, falls notwendig, mit einem sauberen Tuch.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.

2-LITER-DRAINAGEBEUTEL

Alle **Ugo** 2-L-Drainagebeutel haben einen 90cm-Einlaufschlauch.

Alle **Ugo** 2-L-Drainagebeutel sind für Verbindungsdrainage geeignet (lassen sich für zusätzliche Drainage über Nacht an Ihrem Beinbeutel befestigen).

Ugo 9, **Ugo 10** und **Ugo 11** können nur einmal abgeleitet werden. **Ugo 9** und **Ugo 10** sind nur für Verbindungsdrainage geeignet und können nicht direkt am Katheter angebracht werden.

Ugo 11 ist für Verbindungsdrainage geeignet und kann direkt am Katheter angebracht werden.

Ugo 12 und **Ugo 13** haben ein nadelloses Entnahmeventil und sind für den direkten Anschluss an einen Katheter für bis zu 7 Tage geeignet.

REF.	Produktbeschreibung:		
9/NS/SU/DO	Ugo 9*	Nicht entwässerbar/Reißband	Nicht steril
10/NS/SU/DO	Ugo 10*	T-Hahn für den Einmalgebrauch	Nicht steril
11/S/SU/DO	Ugo 11**	T-Hahn für den Einmalgebrauch	Sterile Taschenverpackung
12/S/D/L	Ugo 12**	Hebelhahn	Sterile Taschenverpackung
13/S/D/T	Ugo 13**	T-Hahn	Sterile Taschenverpackung

* **Ugo 9** und **Ugo 10** werden in wiederverschließbaren 10er-Taschen geliefert.

** **Ugo 11**, **Ugo 12** und **Ugo 13** werden in 10er-Boxen geliefert.

SO BEFESTIGEN UND ENTFERNEN DIE IHREN UGO 2-LITER-DRAINAGEBEUTEL ALS TEIL EINES DRAINAGE-VERBINDUNGSSYSTEMS

Wenn Sie zusätzliche Drainage über Nacht benötigen, dann kann der **Ugo** 2-L-Drainagebeutel mit dem weichen Silikonabfluss-Schlauch am Ende Ihres **Ugo** Beinbeutels verbunden werden (dies nennt sich Verbindungsdrainage).

SCHLAFENSZEIT – BEFESTIGUNG DES UGO 2-L-DRAINAGEBEUTELS

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger dies für Sie macht, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Entfernen Sie Riemen oder Hülle, die Ihren **Ugo** Beinbeutel an Ihrem Bein halten.
- Entfernen Sie die Schutzkappe vom abgestuften Anschluss des **Ugo** 2-L-Drainagebeutels.
- Führen Sie den abgestuften Anschluss des **Ugo** 2-L-Drainagebeutels in den weichen Silikon-schlauch auf dem **Ugo** Beinbeutel ein (stellen Sie eine angemessene Abdichtung sicher).
- Fügen Sie den **Ugo** 2-L-Drainagebeutel in eine Halterung.
- Öffnen Sie den Hebelhahn oder das T-Hahn-Ventil auf Ihrem **Ugo** Beinbeutel, um sofortige und dauerhafte Drainage zu ermöglichen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.

MORGENS – BEFESTIGUNG DES UGO 2-L-DRAINAGEBEUTELS

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger dies für Sie macht, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Schließen Sie den Hebelhahn oder T-Hahn auf Ihrem **Ugo** Beinbeutel.
- Trennen Sie den **Ugo** 2-L-Drainagebeutel vom weichen Silikon-schlauch auf dem **Ugo** Beinbeutel.
- Verwenden Sie Ihre Beinbeutel-Befestigung und die Stützgeräte und passen Sie sie an, um optimale Drainage und Bequemlichkeit zu gewährleisten.
- Entleeren Sie den Urin aus dem **Ugo** 2-L-Drainagebeutel in die Toilette und entfernen Sie den Beutel, wie von Ihrer Krankenschwester empfohlen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.
- Schließen Sie einen benutzten 2-L-Drainagebeutel nie erneut an.

ACHTUNG

Nur für den Einmalgebrauch, nach Benutzung entsorgen.

Die erneute Verwendung des Produkts kann Infektionen zur Folge haben.

Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist.

Konsultieren Sie einen Arzt vor Anwendung mit Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen.

Nicht in giftigen, schädlichen oder korrosiven Bedingungen aufbewahren.

5 Jahre Haltbarkeitsdauer.

Bitte beachten Sie, dass die Volumenmarkierungen, die auf die Beutel gedruckt sind, annähernd sind. Nicht für die genaue Aufzeichnung des Urinabflusses verwenden.

WARNHINWEIS: Von Kindern fernhalten!